

# Testsystem SIMICON EN-DUO-PROT

für Endoskopaufbereitungsautomaten vom Typ Belimed

## Anwendungsbereich:

Testsystem SIMICON EN-DUO-PROT zur Prüfung der Proteinentfernung in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten.

Das Testsystem SIMICON EN-DUO-PROT besteht aus Endoskop-Prüfmodellen zur Simulation der Endoskopkanäle und Prüfmodellen zur Prüfung der Endoskopaußenreinigung, bestückt mit SIMICON RI Indikatoren.

Der Indikator SIMICON RI im SIMICON PCD ist bzgl. der Resistenz vergleichbar mit dem Prüfkörper nach DGKH Leitlinie, sowie konform zur DIN ISO/TS 15883-5.

## Durchführung der Prüfung:

Bitte beachten Sie, dass jede einzelne Ebene gegebenenfalls separat mit einem Testsystem zu prüfen ist.

- 1 Endoskop-Prüfmodelle einsetzen**  
Die Endoskop-Prüfmodelle aus der Aluverpackung entnehmen und an die zu prüfenden Kanäle (A + B) anschließen.

### ACHTUNG:

Die Endoskop-Prüfmodelle enthalten bereits die Indikatoren SIMICON RI.  
**Bitte nicht öffnen!**

Die Endoskop-Prüfmodelle zusammengerollt lassen, Kabelbinder nicht entfernen.

- 2 Prüfmodelle zur Endoskopaußenreinigung einsetzen**  
Die Prüfmodelle aus der Aluverpackung entnehmen und an den Stellen (C) und (D) am Beladungswagen anbringen (siehe Skizze).

### ACHTUNG:

Die Prüfmodelle enthalten bereits die Indikatoren SIMICON RI.  
**Bitte nicht öffnen!**

Es wird empfohlen, ein Prüfmodell (C) im oberen hinteren Bereich des Nutzraumes und das zweite Prüfmodell (D) im Kleinteilekorb zu platzieren.

- !** Reinigungs- und Desinfektionsprogramm auswählen und starten.

### WICHTIG:

**Zum Nachweis der Restproteinmenge muss der Reinigungs- und Desinfektionsprozess nach der Reinigung abgebrochen werden.**

- 3 Prüfbericht vollständig ausfüllen.**  
Prüfebene und Prüfstelle (Kanäle) eindeutig kennzeichnen.  
Adresse und Fax-/Telefonnummer nicht vergessen!

- 4 Entnahme der Prüfmodelle:**  
**ACHTUNG:** Nachfolgende Schritte **mit Einmalhandschuhen ausführen!**

Die Endoskop-Prüfmodelle entnehmen und ungeöffnet in die jeweilige Rücksendeverpackung geben (selbstklebend). Diese mit A und B kennzeichnen.

Die Prüfmodelle zur Endoskopaußenreinigung entnehmen und in die jeweilige Rücksendeverpackung geben (selbstklebend). Diese mit C und D kennzeichnen.

Das Testsystem an das Hygiene-Institut senden.

Bitte achten Sie vor der Rücksendung auf die Vollständigkeit des Testsystems.

Nach erfolgter Restproteinanalyse erhalten Sie das Original des Prüfberichts mit Ergebnis und Beurteilung vom Hygiene-Institut zurück.

